

Protein Calibrator 5 Level Series

Řada kalibrátorů z lidského séra určená pro použití při imunoturbidimetrických stanoveních

REF

A00704

Cont.

5x 1 mL

Protein Calibrator 5 Level Series

SLOŽENÍ

Protein Calibrator Series je vyroben z defibrinované lidské plazmy, kapalný, stabilizovaný a filtrovaný přes filtr s póry 0.2 μ.
 Azid sodný 0.095 %

PŘÍPRAVA

Kalibrátory jsou kapalné, připravené k použití.

SZABILITA A SKLADOVÁNÍ

Skladování: ve 2 – 8 °C
 Stabilita: po celou dobu použitelnosti
 Stabilita po otevření: 6 týdnů ve 2 – 8 °C
 NEZMRAZUJTE!

POKYNY PRO POUŽITÍ

1. Pro kalibrační sérum dodržujte stejný pracovní postup jako pro vzorky.
2. Před použitím vytemperujte kalibrační sérum na teplotu 22 – 28°C.
3. Kalibrační sérum by nemělo být skladováno při pokojové teplotě déle než 6 hodin. Skladujte při doporučené 2 – 8°C. Lahvičku vždy dobře uzavřete víčkem, aby se zabránilo mikrobiální kontaminaci.

WARNINGS AND PRECATIONS

1. Kalibrátor je určen pouze pro "in vitro" použití.
2. Lidské sérum použité při výrobě tohoto produktu bylo testováno pomocí předepsaných souprav pro stanovení HIV, HCV a HBsAg a bylo shledáno negativním. Vzhledem k tomu, že žádná testovací metoda nemůže plně zaručit, že produkty vyrobené z lidské krve neobsahují viry HIV, hepatitis B a hepatitis C, je nutné zacházet s tímto produktem, obdobně jako se vzorky pacientů, jako s potenciálním infekčním materiálem.
3. Reagencie obsahují azid sodný, nepožívejte. Zabraňte kontaktu s kůží a sliznicemi. V přítomnosti těžkých kovů (měď a olovo) vytváří azid sodný výbušné azidy.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Dodržujte lokální předpisy pro nakládání s odpady.

