

Karta postupu odběru a extrakce vzorku

Odběr vzorku


1. Odběr vzorku výtěru z nosohltanu

1. Sterilní tyčinku vložte do nosní dírky pacienta, abyste se dostaly k povrchu zadního nosohltanu.
2. Vytřete povrch zadního nosohltanu 5-10 krát.
3. Sterilní tyčinku vyjměte z nosní dutiny a vyhněte se odběru nadměrně objemného nebo vysoce viskózního vzorku z nosohltanu.



2. Odběr vzorku výtěru z nosu

1. Sterilní tyčinku vložte méně než jeden palec (přibližně 2 cm) do nosní dírky (dokud nezacítíte odpor na skořepách).
2. Tyčinkou otočte 5-10 krát proti stěně nosu. Pomocí stejné tyčinky zopakujte postup odběru v druhé nosní dírce.
3. Sterilní tyčinku vyjměte z nosní dutiny a vyhněte se odběru nadměrně objemného nebo vysoce viskózního vzorku z nosu.

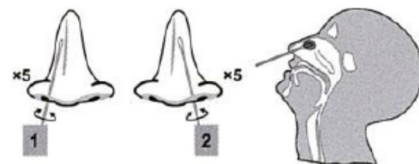

Testování

1

Přidejte všechny jednorázový pufr následovně do extrakční zkumavky:




2

Vložte tyčinku do extrakční zkumavky, míchejte tyčinkou přibližně 10 sekund, zatímco budete tlačit její proti vnitřku zkumavky



3

Tyčinku vyjměte a přitom tlače její hlavičce proti vnitřku extrakční zkumavky. Tyčinku zlikvidujte

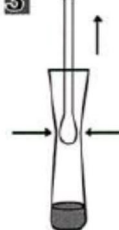

4


Nasaďte kapátkovou špičku extrakční zkumavky



5


Přidejte 3 kapky extrahovaného vzorku do vzorkové jamky (S) kazety

3 kapky extrahovaného vzorku

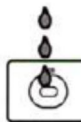

6

Výsledky odečítejte po 15 minutách

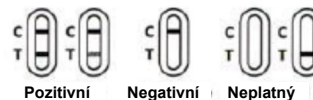

143058000